

## Aide-mémoire pour l'utilisation de la caméra-patient

### Informations de base

La caméra-patient devrait être fixée sur le côté du chariot polyvalent de télésanté. Lorsque vous la prenez, assurez-vous de tirer le fil délicatement en utilisant la boule de plastique tout en prenant garde de ne pas abîmer le connecteur qui relie le fil à la caméra (voir photo ci-dessous).



Pour afficher l'image de la caméra à l'écran, vous devez appuyer sur le bouton « AUX » de la télécommande (voir no 1).


Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur le pictogramme de la caméra (voir no 2 sur l'image ci-contre).



Vous êtes maintenant prêt à débiter!

### Utilisation

- **Bouton arrêt sur images** : Ce dernier se situe le plus près de la tête de la caméra. C'est au moment où vous relâchez le bouton que l'arrêt s'effectue. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir au mode « caméra ».
- **Indicateur d'arrêt sur image** : Cette lumière clignote lorsqu'il y a un « arrêt sur image » et est allumée quand on retourne en mode « caméra ».
- **Indicateur de lumière UV** : Quand la lumière est rouge, l'éclairage ultraviolet (UV) est actif; quand elle est blanche l'éclairage régulier blanc est actif.
- **Bouton lumière** : Appuyez sur ce bouton pour contrôler le niveau d'éclairage (les modes d'éclairage sont UV fort, moyen et bas ainsi que régulier fort, moyen et bas).

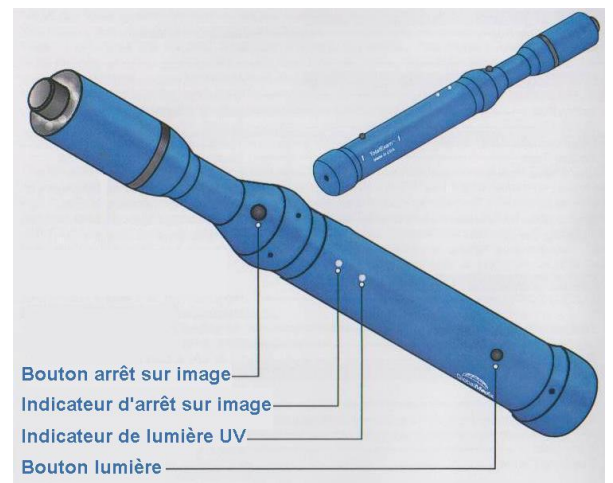

### Contrôle du foyer

Il y a trois niveaux de mise au point. Ceux-ci sont contrôlés à partir de la tête pivotante de la caméra.

- Pour des *plans larges* : Alignez la tête pivotante avec les trois petites lignes.
- Pour des *plans moyens* : Alignez la tête de la caméra avec la ligne double (pour le fond de la gorge par exemple).
- Pour des *plans rapprochés* : Alignez la tête de la caméra avec la ligne simple.



Ces indicateurs constituent seulement un point de départ. Afin d'obtenir la meilleure image possible, vous devez réajuster votre mise au point à chaque nouvelle prise de vue.

### COORDONNÉES DU CECOT

Tél. : 514 412-4294 ou 1 877 536-3202 (sans frais au Québec)

Courriel : visio-cusm@muhc.mcgill.ca

## Aide-mémoire pour l'utilisation de la caméra-patient

### Balance des blancs

Il y a deux modes de balance des blancs.


- *Balance des blancs automatique* (mode par défaut) : Il s'ajuste automatiquement selon la température de l'éclairage. Ce mode est variable.
- *Balance des tons de peau* : Pour passer en mode balance des tons de peau, appuyez environ sept secondes sur le bouton « arrêt sur image » en dirigeant la caméra vers la peau du patient. La lumière indicatrice clignotera alors sept fois. La caméra sera ajustée pour mieux représenter la peau du patient. Ce mode est fixe, donc à refaire avec chaque nouveau patient.

### Périphériques

- *Capuchon d'examen<sup>1</sup>* : Cet accessoire est constitué de deux parties, un col-contact (accessoire blanc) et un capuchon (partie noire).




- *Abaisse-langue<sup>2</sup>* : Un adaptateur à abaisse-langue est compris (pour bien examiner le fond de la gorge).

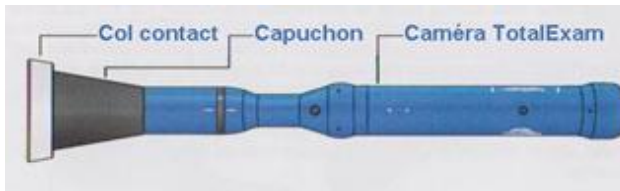

<sup>1</sup> Le capuchon se glisse sur la tête de la caméra tandis que le col-contact jetable se fixe au bout du capuchon. Il faut ensuite que vous positionniez le niveau de la mise au point de la caméra à la ligne simple. Finalement, collez le col-contact à la peau du patient, choisissez la source lumineuse désirée et effectuez la mise au point.

- <sup>2</sup> L'adaptateur à abaisse-langue se fixe sur le cou de la caméra. Il fonctionne pour un abaisse-langue de grandeur normale. Tournez la tête pivotante sur la double ligne puis, une fois le niveau de lumière choisi, faites la mise au point.

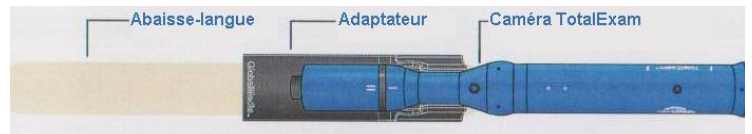

### Rangement



Pour ranger la caméra, rentrez-la doucement dans son socle de mousse (voir photo à gauche). Assurez-vous qu'elle soit bien fixée puis rembobinez le fil. Encore une fois, faites attention de ne pas tirer le fil de la caméra.

Vous pouvez remettre la source du codec à « caméra principale » et appuyez deux fois sur le bouton rouge pour mettre l'appareil en veille (voir manette à droite).

N'oubliez pas que vous pouvez toujours contacter le Centre d'expertise et de coordination de télésanté (CECoT) en cas de problèmes ou pour toute question.



### COORDONNÉES DU CECOT

Tél. : 514 412-4294 ou 1 877 536-3202 (sans frais au Québec)

Courriel : visio-cusm@muhc.mcgill.ca